

MODALITA' DI PRELIEVO CAMPIONI -ANIMALI DA COMPAGNIA

LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE

Feci

Canì e gatti padronali e randagi: si procede alla raccolta di feci individuali, cercando di prelevare circa 20 grammi (minimo 2g per la diagnosi con tecniche FLOTAC) su una superficie pulita.

Canì e gatti ospitati in canili e gattili: si procede alla raccolta delle feci in più punti del ricovero per la costituzione di un pool per box, utilizzando un barattolo a vite ed un abbassalingua monouso.

Animali esotici e non convenzionali: si procede alla raccolta di feci individuali, cercando di prelevare minimo 2g per la diagnosi con tecniche FLOTAC, su una superficie pulita.

Sangue e/o siero

- Per la ricerca di **emoparassiti** e **microfilarie** utilizzare le provette con anticoagulante idonee al prelievo di sangue.

- Per la diagnosi sierologica utilizzare le provette con gel separatore.

Urine

- Prelevare le urine in un contenitore sterile.

Parassiti adulti

Conservare il parassita adulto da identificare in etanolo 70%.

Dopo la raccolta portare o spedire i campioni in laboratorio entro 24h, oppure conservare i campioni a +4°C e farli pervenire al laboratorio entro massimo 2 giorni dalla raccolta.